

CARENA™

Lojer Merivaara Carena sairaalasänky

Huippuluokan sairaalasänky



Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 330 kg
2. Eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
3. Loistava ergonomia sekä sairaanhoitajalle että potilaalle

Carena on huippuluokan sairaalasänky, joka tarjoaa verrattoman ergonomian sekä potilaalle että hoitajalle. Sängyssä on sähkösäätöinen 4-osainen makuutaso (215,5 x 80/85/90 cm), jossa on sähkötoiminen korkeuden, selkäosan, reisosan ja pohjeosan säätö. Pohjeosaa voidaan lisäksi säätää manuaalisesti kaasujousen keventämänä. Trendelenburg ja anti-Trendelenburg säädöt sekä manuaalisesti että sähköisesti.

Sängyn suunnittelussa on huomioitu hoitohenkilöstön tarpeet, väestön keskimääräinen painon nousu sekä vanhusten määrän suhteellinen kasvu. Sängyn rakenne mahdollistaa pääsyn lähelle potilasta eivätkä laidat levennä sänkyä. Sänky on pienikokoisten potilaiden mieleen, sillä alakorkeus (alkaen 31,5 cm) helpottaa sänkyyn menoa ja sieltä poistumista omin voimin. Sänky täyttää standardit IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) ja SFS-EN 60601-1.

Sänky kantaa mainiosti suurikokoisenkin potilaan, sillä kuormitettavuus (SWL) on 330 kg. Tämä uuden sukupolven sairaalasänky soveltuu hyvin päiväkirurgiaan, ensiapuun, vuodeosastoille, teho-osastoille ja myös hoivakoteihin.

LOJER® For easy care

Carena helpottaa monia hoitorutiineja

Carena auttaa tehostamaan hoitohenkilökunnan työtä huomattavasti. Se on suunniteltu terveydenhoidon ammattilaisten avuksi heidän päivittäisessä työssään ja helpottamaan monia potilaiden hoitoon liittyviä rutiineja. Sängyn käteviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi valinnainen taittuva pääty, joka toimii myös taitettavana lakanoiden laskualustana ja patjan pidikkeenä, mikä tekee esimerkiksi siivouksesta ja sängyn petaamisesta entistä vaivattomampaa ja nopeampaa.



Kätevä jarru

Jarrupolkimen uuden muotoilun ansiosta jarrun lukitseminen ja vapauttaminen on vaivatonta. Jarru on sijoitettu ergonomisesti ja polkimeen on entistä helpompi ulottua.

Suunniteltu helposti puhdistettavaksi

Makuutason muotoilu ja irrotettavat pohjalevyt tekevät sängyn puhdistamisesta helppoa. Sängyssä ei ole teräviä kulmia tai pieniä rakoja, virtaviivaisen muotoilun ja pestävien pohjalevyjen tai valinnaisen metalliverkon ansiosta siivous sujuu vaivattomasti.



Innovatiivinen rakenne

Sängyn pystysuora nostoliike ei vaadi lisätilaa. Sängyn rakenteen ansiosta Trendelenburg-säätö voidaan tehdä myös silloin, kun sänky on ala-asennossa. Sängyn ainutlaatuinen nostomekanismi on patentoitu.



Kevyt liikutella

Carenan suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sängyn siirrettävyyteen. Sänky painaa noin 100 kg, mikä takaa ihanteellisen liikuteltavuuden. Carena-sänkyä on helppoa liikutella, vaikka siinä hoidettaisiin isokokoisia potilaita.

Neliosainen makuutaso

Uudelleen mitoitettu jalkaosaa takaa potilaalle mukavan asennon, kun makuutasoa säädetään. Se estää myös tehokkaasti potilaan liukumisen selkäosaa liikuteltaessa. Oikeat ja muunneltavat hoitoasennot ovat tärkeitä potilaiden hyvinvoinnille. Neliosaisen makuutason ansiosta niiden toteuttaminen on helppoa.



Sähköinen Trendelenburg

Sähköistä Trendelenburg-säätöä käytetään usein apuna asentohoidoissa. Carenan rakenteen ansiosta Trendelenburg-asentoa oidaan käyttää jopa sängyn ollessa ala-asennossa. Saatavana on myös manuaalinen Trendelenburg.



Pitkä käyttöikä

Carena-sängyt ovat kestäviä ja helppoja huoltaa. Ne on suunniteltu pitkäkestoiseen ja erittäin kovaan käyttöön. Carena sängystä on saatavilla myös konepestävä malli.

Ainutlaatuinen alakorkeus

Yhdessä Carena-sängyn ainutlaatuisen alakorkeuden (alk. 31,5 cm) ja valinnaisen nousutuen ansiosta sängystä ja sänkyyn nouseminen on turvallista ja helppoa.



Korkea kuormitettavuus SWL 330 kg

Potilaiden keskipaino nousee jatkuvasti ja se asettaa tuotteiden kestävyydelle yhä kasvavia vaatimuksia. Carena on uranuurtaja tässäkin asiassa – sängyn kuormitettavuus on 330 kg ja suurin sallittu potilaspaino 300 kg.



Helppo huoltaa

Carenan muotoilun ansiosta sängyn huoltaminen on helpompaa kuin koskaan: irrotettavien pohjalevyjen ansiosta huolto pääsee helposti käsiksi kaikkiin tarvittaviin osiin. Sängyn säätöjen ja rakenteen ylläpito on yksinkertaista ja sen huoltotarve on erittäin pieni.

Laaja valikoima lisävarusteita

Kattavan lisävarustevalikoiman ansiosta Carena soveltuu käyttöön niin ensiavussa, pitkäaikaishoidossa kuin teho-osastollakin. Kaikki suosituimmat lisävarusteet ovat yhteensopivia Carena-sänkyjen kanssa. Vanhat sänkymallit on helppo päivittää uusien, värikkäiden ja yhteensopivien lisävarusteiden avulla.



Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys kaiteilla	90 / 95 / 100 cm
Makuutason leveys	80 / 85 / 90 cm
Kokonaispituus	215 cm
Korkeuden säätöalue	31,5 - 81,5 cm (125 mm pyörillä), 34 - 84 cm (150 mm pyörillä)
Suosittelava patjakoko	75 x 200 cm (80 cm sängylle) 80 x 200 cm (85 cm sängylle) 85 x 200 cm (90 cm sängylle)
Pyörät	Ø150 mm keskuskittavat pyörät: 2 vipupoljinta ja jarrukaari jalkopäässä
Potilaan enimmäispaino	300 kg
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL)	330 kg
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	12° / 6°
Selkäosan säätö	0 - 70°
Reisiosan säätö	0 - 29°
Sääriosan säätö	0 - 24°
Suojausluokka	IP66
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain pohjalevyt erikoismuotoiltua ABS-muovia (ilmastoivat ja irrotettavat) kulmarullat paikka lepositeille pystysuora nousuliike eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
CE-merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Makuutason pidennys sekä jalkaosan jatkokappale +30 cm (80 ja 90 cm leveyksiin), ABS-muovia
- Säädettävä makuutason metalliverkkopohja
- RTG makuutaso (80 ja 90 cm leveyksiin)
- Patjanrajoitin, kromattu
- Lisävarustekiskon kiinnitysosat selkäosaan, pari
- Keskuskittavat Ø150 mm kaksoispyörät ja antistaattinen suuntapyörä
- Keskuskittavat Ø200 mm pyörät
- 5. pyörä
- Keskuskittavat Ø150 mm kaksoispyörät
- Selkäosan pikavapautin (CPR)
- Akkuvarustus säätöihin
- Potentiaalintasausjärjestelmä
- Jalkaohjain sängyn korkeussäädöille
- Lisäkäsiohjain
- Kohottautumisteline
- Nousu-/siirtymistuki
- Adapteri (2 kpl) nousu-/siirtymistuella

Muut lisävarusteet:

- Irrotettava sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen, vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Petaustaso / alastaittuva sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen, vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Pitkä kokoontaittuva sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
- 3/4 sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
- Potilaspaperikori (sängyn pätyyn)
- Monitori- / kirjoitustaso
- Nesteenantoteline: 4-koukkuinen tai kohottautumistelineeseen kiinnitettävä
- Dreenipussiteline
- Virtsapulloteline
- Happipulloteline, 5 kg
- Lisävarustekisko
- Johdonpidike sängyn virtajohdolle

